



SentrX™



För hund, katt och häst

Aptus® SentrX™



Följande SentrX produkter är tillgängliga på den svenska marknaden



Aptus® SentrX EYE GEL
10 x 3 ml. För ögon.



Aptus® SentrX EYE DROPS
10 ml. För ögon.



Aptus® SentrX SPRAY
15 ml. För sårläkning.

TANKEN BAKOM SENTRX

En frisk och intakt vävnad reglerar och stödjer den extracellulära matrix (ECM) som ombesörjer kommunikationen mellan hudens olika celler.

När en sårskada uppstår, frigörs signaler från vävnaden som i sin tur stimulerar cellerna att reparera skadan. De celler som medverkar i den naturliga läkningsprocessen kan lättare migrera genom det tredimensionella nätverk, som skapas av SentrX hydrogel och sluta såret. Detta bidrar till en snabbare och effektivare läkningsprocess.

SentrX korslänkade hyaluronsyra har med sin höga molekylvikt god förmåga att attrahera och binda fukt. Teknologin lämpar sig därför väl även för ögon, då en hög viscositet håller produkten kvar under en lång tid.

Hyaluronsyra

SentrX hydrogel är baserad på kemiskt modifierad, syntetisk hyaluronsyra (fermenterad).


Hyaluronsyra finns naturligt i kroppen, vilket gör att den tolereras väl.

Hyaluronsyran har hög molekylvikt och molekylerna är kemiskt kopplade till varandra, för att bilda en struktur i form av ett tredimensionellt nätverk.

Hyaluronsyra (HA)

modifieras till att innehålla sulfhydrylgrupper, vilket ger Hyasent-S (även kallat CMHA-S i litteraturen).

Kemisk formel för CMHA-S

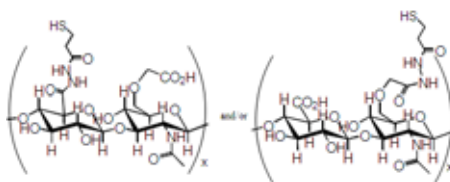

SentrX-materialet är helt biokompatibelt, biologiskt nedbrytbart och utan immunogena egenskaper.

Dessa biomaterial har beskrivits i ett flertal vetenskapliga tidskrifter, besök gärna:

- SentrX USA's hemsida för ytterligare information: sentrxanimalcare.com
- Aptus hemsida för ytterligare information: aptuspet.se/lankar

APTUS SENTRX EYE GEL

10 st X 3 ml droppflaska. Ögongel.
Hyaluronsyra 0,8 %.



Den höga viskositeten bidrar till att Aptus SentrX EYE GEL har god förmåga att stanna kvar i ögat. Gelen är lämplig att använda i samband med skador och förändringar i ögat, för att smörja, skydda och återfukta vävnaderna. Aptus SentrX eye gel är avsedd för katt, hund och häst. Produkten innehåller inga konserveringsmedel. Var därför alltid mycket noga med hygien.

Hur appliceras Aptus SentrX EYE GEL?

Tvätta alltid händerna innan produkten används!

Droppa gelen direkt i ögat. Ögonlockets naturliga rörelser bidrar till att gelen fördelas jämnt över hela ytan. Aptus SentrX EYE GEL kan användas till dess att normal funktion i ögonen återställs. Aptus SentrX EYE GEL bör endast användas på veterinär inrådan.

Aptus SentrX EYE GEL är sterilförpackad. För hållbarhet se märkning på förpackningen. Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas för frost).

APTUS SENTRX EYE DROPS

10 ml. Ögondroppar.
Hyaluronsyra 0,4 %.



SentrX EYE DROPS, tårsubstitut används vid torra ögon hos hund. Innehållet av korslänkad hyaluronsyra ger en fuktbindande och smörjande effekt under lång tid. Produkten innehåller inga konserveringsmedel. Var alltid noga med hygien.

Hur appliceras Aptus SentrX EYE DROPS?

Tvätta alltid händerna innan produkten används!

Dropplas direkt i ögat. Ögonlockets naturliga rörelser bidrar till att tårsubstitutet fördelas jämnt över hela ytan. Aptus SentrX EYE DROPS bör endast användas på veterinär inrådan.

Aptus SentrX EYE DROPS är sterilförpackad. För hållbarhet se märkning på förpackningen. Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas för frost).



APTUS SENTRX SPRAY

15 ml. Hydrogel i sprayform.



Aptus SentrX SPRAY är en sårpray för katt, hund, häst och andra sällskapsdjur. Hydrogelen understödjer cellernas naturliga läkningsprocess och bidrar på så sätt till en snabb och effektiv sårhäkning.

Rekommenderas vid:

- Traumatiska sårskador.
- Färska icke infekterade sår.
- Kroniska sårskador (debridering krävs innan behandling).

Hur appliceras Aptus SentrX SPRAY?

Applicera SentrX SPRAY över hela sårytan. Vid behov bandagera enligt gängse rutiner, samt spraya på nytt vid varje omläggning.

Aptus SentrX SPRAY är sterilförpackad. För hållbarhet se märkning på förpackningen. Förvaras i rumstemperatur (får ej utsättas för frost).



FRÅGOR OCH SVAR

Hur kan Aptus SentrX produkter stimulera läkningsprocessen?

I frisk vävnad stödjer och reglerar extracellulär matrix (ECM) kommunikationen mellan cellerna. Vid vävnadsskada frigörs signaler som stimulerar cellerna att reparera skadan. Aptus SentrX produkter bidrar till att skapa en matrix, som understödjer djurets naturliga läkningsförmåga.

När ska Aptus SentrX SPRAY användas?

Produkten är avsedd att användas på färska eller debriderade sår, då produkten har effekt endast i kontakt med färsk såryta. Applicera sårgelen över hela sårytan och bandagera vid behov. Bandagera enligt gängse metoder, samt applicera ny gel vid varje omläggning.

Kan man använda SentrX SPRAY på äldre kroniska sår?

Ja, efter debridering av såret. Det är i kontakt med färsk vävnad produkten har bäst effekt.

Hur ofta bör ett sår behandlas med Aptus SentrX SPRAY?

Om möjligt behandla såret dagligen med Aptus SentrX SPRAY fram till läkning, alternativt vid varje omläggning. Upprepad debridering kan i vissa fall krävas för optimal läkning.

När ska jag välja SentrX EYE GEL alternativt SentrX EYE DROPS?

SentrX Eye GEL har hög viskositet och därmed en god förmåga att stanna kvar i ögat, och är lämplig att använda i samband med skador och förändringar i ögat, för att smörja, skydda och återfukta vävnaderna. SentrX EYE DROPS är mindre viskös och kan med fördel användas dagligen vid torra ögon som behöver återfuktas och smörjas över lång tid.



FALLSTUDIE - KATT

Sår vid svansroten

Katt med stort infekterat sår vid svansroten. Såret debriderades kirurgiskt men såret gick inte att suturera på grund av dess omfattning och lokalisering. FelitrX gel* applicerades dagligen på såret.

Ytterligare kirurgi krävdes för att bit för bit kunna sluta såret. Veterinärens bedömning var att FelitrX gel* möjliggjorde en god och snabb läkning och efter drygt två veckor kunde såret helt slutas.

Notera: FelitrX gel marknadsförs i Sverige under namnet Aptus® SentrX spray.



Behandlingen påbörjas.



Efter 4 dagars behandling.



Efter 9 dagar påbörjades den kirurgiska slutningen av såret.



16 dagar efter påbörjad behandling kunde såret slutas helt.

FALLSTUDIE - HUND

Tassgranulom

En 15 år gammal schäfertik med granulom på framsidan av en tass. Granulomet avlägsnades kirurgiskt.

CanitrX gel* applicerades postoperativt och vid varje bandagebyte. Såret läkte fullständigt på några veckor.

* CanitrX gel = Aptus® SentrX spray



Granulomet preoperativt.



Två veckor efter ingreppet är läkningsprocessen god.



Tassen dygt en månad efter operation.

Notera: CanitrX gel marknadsförs i Sverige under namnet Aptus® SentrX spray.

FALLSTUDIE - HÄST

Sårskada, munhåla

Hästen Ernie ådrog sig en drygt 10 cm lång sårskada vid mungipan med perforation in mot munhålan. Dr Cinda Velasquez rengjorde och suturerade såret. Fyra dagar senare upptäcktes en abscess. Såret debriderades

och suturerades på nytt. Då det inte längre fanns några kliniska tecken på infektion inleddes behandling med EquitrX Gel*. Efter fyra dagars behandling med EquitrX Gel var skadan nästan läkt.

* EquitrX Gel = Aptus® SentrX spray

Notera: EquitrX Gel marknadsförs i Sverige under namnet Aptus® SentrX Spray.



Sårskada



Efter första behandlingen



Abscessen behandlad och användning av EquitrX Gel dag 1 inledd



Användning av EquitrX Gel dag 2



Användning av EquitrX Gel dag 4

"Jag påbörjade behandling med EquitrX och sårskadan var nästan helt läkt efter 4 dagar. Det har nu gått ungefär en månad och endast minimal ärrbildning som syns enbart om man tittar nära."

Dr Cinda Velasquez



Plats för stämpel

Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition och välbefinnande kan stärkas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter. Aptus®-serien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health, har utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt den bästa konditionen och hälsan i alla livets stadier.

Besök gärna Aptus® hemsida:

www.aptuspet.com



facebook.com/AptusSverige

